




## Veloped Stockhalter – Montagehinweis

2-teiliger Stockhalter für das Veloped, der auch als Sicherheitsgurt dient, wenn das Veloped für den Transport oder die Lagerung zusammengeklappt wird. Der Stockhalter passt auf alle Veloped-Modelle.

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone um Videoanleitungen anzuschauen.

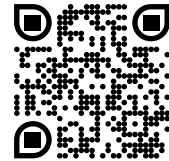

### ① Befestigen Sie den hinteren Halter.

Wickeln Sie das Band des hinteren Halters um den oberen Teil des hinteren vertikalen Rahmenrohrs, direkt unter dem Schnellspanner für die Höhenverstellung.



### ② Ziehen Sie den Gurt fest.

Ziehen Sie das Band fest, wickeln Sie es um das Rohr und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss. Lassen Sie die überschüssige Länge des Bandes frei hängen.



### ③ Passen Sie die hintere Schlaufe an.

Die Größe der hinteren Schlaufe kann durch Lösen des Klettverschlusses angepasst werden. Möglicherweise müssen Sie die Schlaufe vorsichtig zusammendrücken, um eine abgerundete/kreisförmige Form zu erhalten.



#### ④ Den Fronthalter anbringen.

Wickeln Sie den vorderen Halter um das obere Rahmenrohr, direkt hinter der Korbschienenbefestigung. Achten Sie darauf, dass das Anti-Rutsch-Patch zum Rahmenrohr zeigt.



#### ⑤ Passen Sie die vordere Schlaufe an.

Die Größe der vorderen Schlaufe kann durch Lösen des Klettverschlusses angepasst werden. Möglicherweise müssen Sie die Schlaufe vorsichtig zusammendrücken, um eine abgerundete/kreisförmige Form zu erhalten.



#### ⑥ Befestigen Sie den Gehstock.

Bringen Sie den Gehstock an, indem Sie ihn von hinten zuerst durch die hintere und dann durch die vordere Halterung schieben.



#### ⑦ Sichern Sie den Rahmen.

Sie können den hinteren Stockhalterband verwenden, um den Rahmen wenn zusammengefaltet zu sichern (Transport / Verwahrung).