




## Gehstockhalter – Montageanleitung

Zweiteiliger Stockhalter, der am Griff und am Rahmen des Walkers befestigt wird. Der obere Teil verfügt über eine praktische Schnellverschlussfunktion, sodass der Stock schnell angebracht und entfernt werden kann. Passend für die Rollatoren Walker 9er, 12er und 14er.

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone um Videoanleitungen anzuschauen.

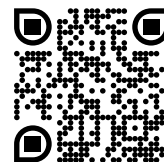

- ① Drehen Sie den oberen Halter so, dass der Schriftzug nach oben zeigt.



- ② Rasten Sie den Halter auf den oberen Teil des Handgriffrohrs ein.

Rasten Sie die Halterung auf das Oberteil des Handgriffrohrs ein und schrauben Sie diese anschließend mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.




- ③ Wenn Sie sowohl den Stockhalter als auch die Rückenlehne anbringen

**Hinweis:** Passen Sie die Position des Bremshebels so an, dass neben der Rückenlehne Platz für den oberen Stockhalter bleibt. Möglicherweise muss der Stockhalter um ca. 30 Grad nach außen geneigt werden, damit Stockhalter und Rückenlehne am Walker befestigt werden können.




#### ④ Befestigen Sie den unteren Halter am Rahmen

Für die Rechts-/Linksmontage drehen Sie den unteren Halter so, dass Sie die Schraube von außen erreichen. Um den unteren Halter am Rahmen zu befestigen, wickeln Sie den Gurt um das Rahmenrohr und schieben Sie ihn in die Bohrung des Halters.

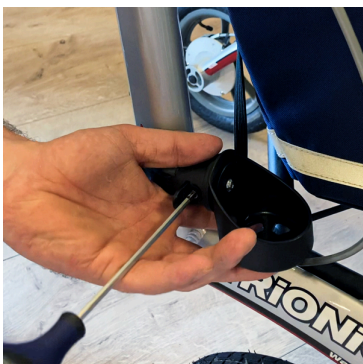

#### ⑤ Schraube/Gurt festziehen

Ziehen Sie die Schraube/den Riemen mit einem 4-mm-Inbusschlüssel fest.

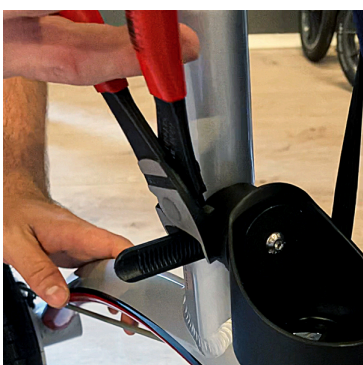

#### ⑥ Schneiden Sie die überschüssige Länge des Riemens ab

Schneiden Sie die überschüssige Länge des Bandes mit einem Kabelschneider ab.



#### ⑦ Einsatzbereit