



## Trionic Walker Rückengurt – Montagehinweis



Der ergonomische und gepolsterte Rückengurt, aus wasserabweisendem und haltbarem 600D Polyester, ist passend für die Rollatoren Walker 9er, 12er und 14er. Damit hat man beim Sitzen auf dem Rollator eine angenehme und sichere Stütze für den Rücken.

Die Länge/Tiefe des Rückengurtes ist verstellbar.

### ① Abschrauben.

Entfernen Sie die Schrauben und die Muttern von den beiden Klammern.

### ② Befestigen Sie die Rückengurt.

Öffnen Sie die Klammern ein wenig, und befestigen Sie die Klammern auf die Griffrohre. **WICHTIG:** Überprüfen Sie die Position der "TRiONiC" Logotype, da der Rückengurt gewinkelt ist.



### ③ Den ganzen Weg nach oben.

Schieben Sie die beiden Klammern ganz nach oben. Es kann sein, dass Sie die Schraube des Bremshebels ein wenig lösen müssen, um den Bremshebel ein Stück nach hinten zu bewegen.





**④ Befestigen Sie die Rückengurt.**

Mit einem 4 mm Imbusschlüssel, befestigen Sie die beiden Klammern mit den Schrauben und Muttern. Das Band des Rückengurtes soll, vorn von der Klamme, auf beiden Seiten nach vorn positioniert sein.

**⑤ Diese Foto zeigt die korrekte Montage.**



**Vor dem Aufklappen des Rollators.**

Um den Rollator auszuklappen, kippen Sie zuerst den Rückengurt nach oben.

**Bei Bedarf**

Wenn Sie den Rückengurt zu kurz/zu lang finden, können Sie die Länge verstellen. Entfernen Sie die beiden Schrauben und Muttern und bauen Sie den Rückengurt wieder zusammen.

