




Handbuch: Austausch des Rückenlehnergurts des Trionic Walker



- ① Lösen Sie die Schraube, die den Riemen hält, mit einem 3-mm-Inbusschlüssel.
Auf der anderen Seite wiederholen.



- ② Stellen Sie sicher, dass Sie die Schraube, die Mutter und den Rohrabstandshalter wiederfinden.

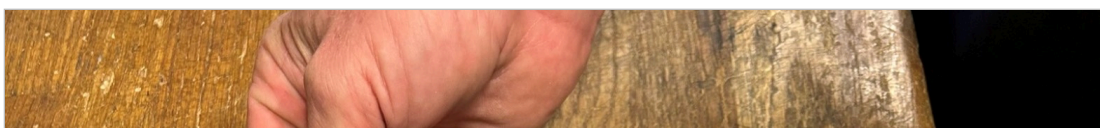



Handbuch: Austausch des Rückenlehnengurts des Trionic Walker



- ⑤ Legen Sie das neue Ersatzband in die Polsterung ein.

WICHTIG: Achten Sie darauf, das Ende des Riemens wie auf dem Foto gezeigt mit dem TRIONIC-Logo auszurichten.



- ⑥ Stecken Sie den röhrenförmigen Abstandshalter in das Loch am Ende des Riemens.

