



## **Handbuch: Austausch des Rückenlehngurts des Trionic Walker**




① Lösen Sie die Schraube, die den Riemen hält, mit einem 3-mm-Inbusschlüssel.

Auf der anderen Seite wiederholen.



② Stellen Sie sicher, dass Sie die Schraube, die Mutter und den Rohrabstandshalter wiederfinden.

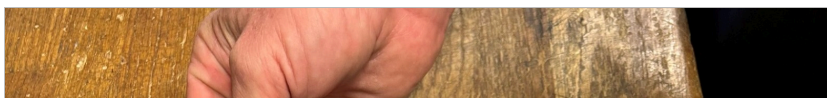



## **Handbuch: Austausch des Rückenlehnengurts des Trionic Walker**



- ⑤ Legen Sie das neue Ersatzband in die Polsterung ein.

**WICHTIG:** Achten Sie darauf, das Ende des Riemens wie auf dem Foto gezeigt mit dem TRIONIC-Logo auszurichten.



- ⑥ Stecken Sie den röhrenförmigen Abstandshalter in das Loch am Ende des Riemens.

