



## Walker Transporttasche – Packanleitung


Die Walker-Transporttasche besteht aus einer Haupttransporttasche und einer kleineren Aufbewahrungs-/Tragetasche. Die Transporttasche passt für alle Walker-Modelle.

Die Transporttasche passt für alle Trionic Walker-Modelle.




### ① Öffnen Sie die Haupttasche

Öffnen Sie den Reißverschluss der Aufbewahrungstasche und packen Sie die Haupttransporttasche aus.

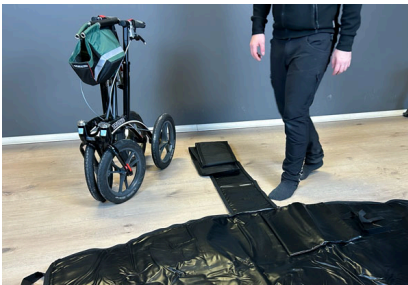

### ② Breiten Sie den Hauptbeutel aus.

Öffnen Sie den Reißverschluss der Haupttasche über die gesamte Länge und legen Sie die Klappen der Tasche auf den Boden.

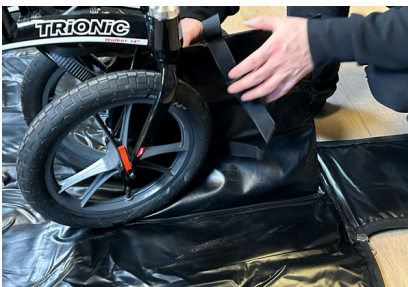

### ③ Stellen Sie den Rollator auf die Tasche.

Platzieren Sie den Walker auf dem Mittelteil der Haupttransporttasche. Die Haupttasche verfügt über eine integrierte gepolsterte Schutzklappe mit einem zusätzlichen Klettverschlussband. Ziehen Sie die gepolsterte Schutzklappe nach oben und platzieren Sie sie zwischen den Vorderradgabeln, um die Lackierung zu schützen.



④ Sichern Sie den zusammengeklappten Rahmen mit dem integrierten Klettverschlussband.



⑤ Falten Sie die mittlere Klappe über den Walker.

⑥ Heben Sie die Seitenklappen an und schließen Sie den Hauptreißverschluss.

⑦ Dieses Foto zeigt den Walker korrekt verpackt.

## **Packanleitung**

*Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone um Videoanleitungen anzuschauen.*